


STバンド ストロングタイプ

エスティーバンド
ストロングタイプ

架台で運ぶ重量のある機器のコード類を
安定させたい。

旧:BMタイプ

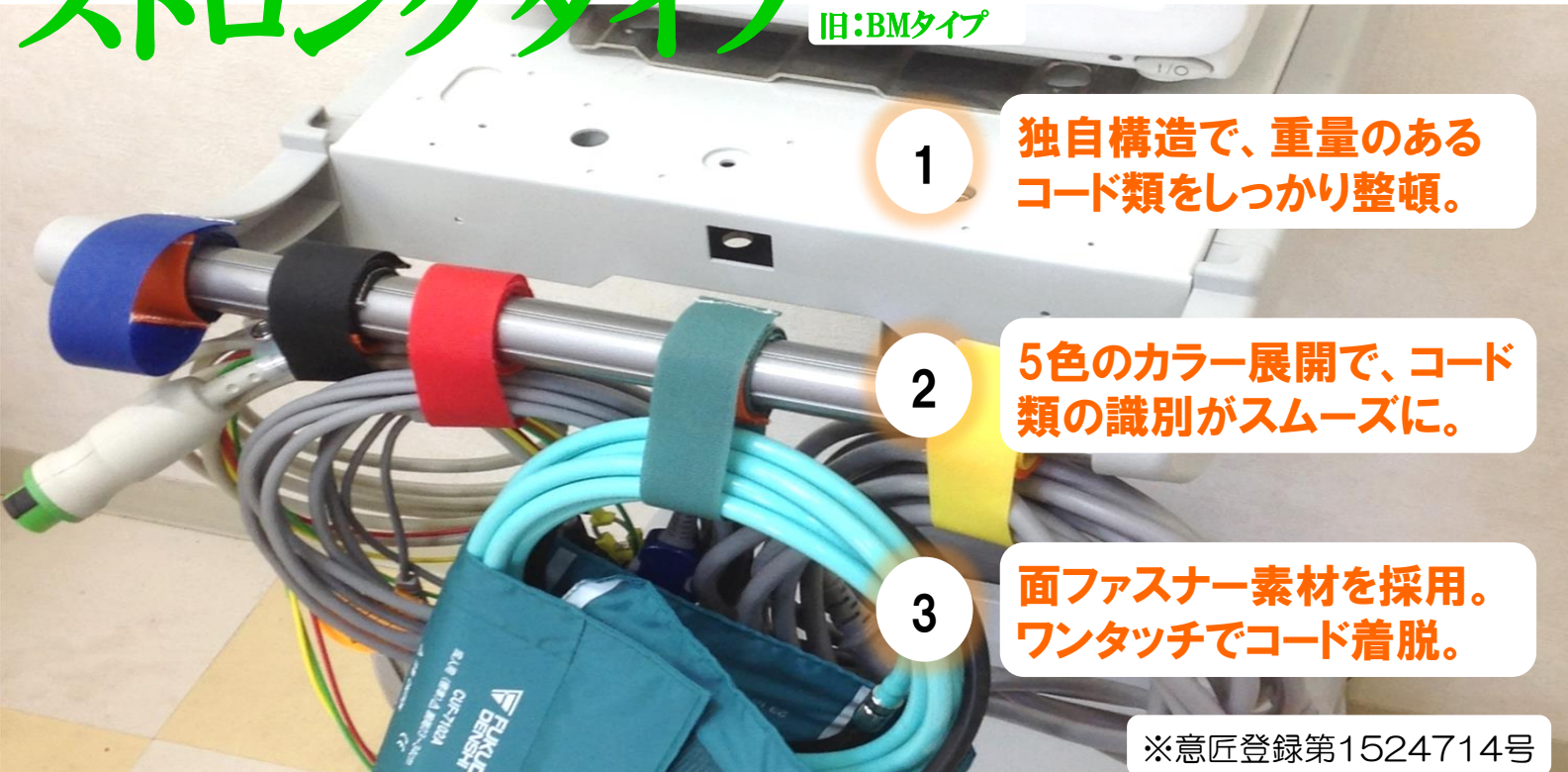

1

独自構造で、重量のある
コード類をしっかり整頓。

2

5色のカラー展開で、コード
類の識別がスムーズに。

3

面ファスナー素材を採用。
ワンタッチでコード着脱。

※意匠登録第1524714号

BLUE・WOODS
Style

医療現場の声をカタチに

目の前にある不安を解消したい。
より確実に。より手早く。より手軽に。

Voice

医療機器には重量のあるコード類も多数。しっかり固定できる…？


➡ 独自構造で耐久力を強化。しっかり確実に整頓が可能。



Voice

誤って使用しないようにコード類をわかりやすく識別したい…。


➡ 5色のカラー展開。見やすく、わかりやすく。

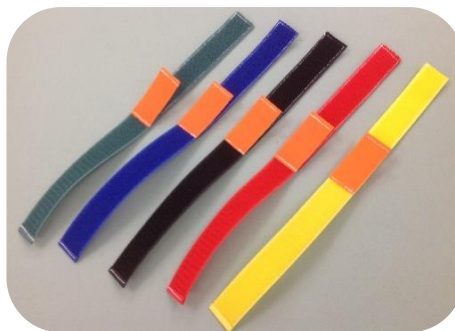

Voice

紐やガーゼで結んでいるが、取り出しが面倒…。

➡ 面ファスナーで架台に固定。コード類の取り出しも簡単。

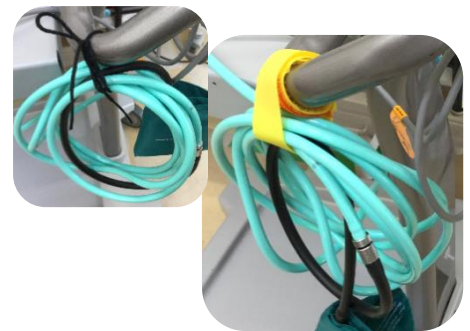

【発売元】

株式会社トム・メディック

メディカルイノベーション事業部

〒039-3524 青森市大字滝沢字下川原14-1

TEL. 017-737-0030 FAX. 017-737-0032

tom-medic inc.

neo medical & rita human support



5色の色別バンドをセットに。多用途にご使用いただけます。

品名	STバンド スrongタイプ (旧:BMタイプ)
製品写真	
装着機器例	生体情報モニター／心電図計／人工呼吸器／麻酔器／内視鏡／手術用ロボット周辺 等
サイズ	幅 25mm × 長さ 310mm
結束径耐荷重	最大径: Φ45 耐荷重: 2.5kg ※使用環境・頻度により変わります
素材	ナイロン100%
使用可能期間	6ヶ月 ※使用環境・頻度により変わります
製品番号	BWS12-01-007
梱包単位	25本入／1箱 (緑・青・黒・赤・黄 各色1本／袋 ×5袋)
標準参考価格(税抜)	15,000円

* 製品の規格は予告なく変更されることもございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

● 巻きつけ方は2通り。用途に合わせてご使用ください ●

パターン1



取付け箇所とバンドの間に余裕を作って巻きつける方法。コード類を束ねた状態でバンドをスライドしたい場合に便利。

パターン2



取付け箇所とバンドを隙間なく巻きつける方法。取付け箇所にバンドをしっかり固定したい場合に便利。

● ご使用上の注意事項 ●

1. テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
2. 水分を含んだり、水中では接着強度が低下しますのでご注意ください。
3. 高圧蒸気滅菌、ガス滅菌には対応しておりません。血液等で汚染された場合は廃棄いただくようお願いいたします。
4. 面ファスナーの接着力は永久的ではありません。使用に際して著しく接着力が低下した場合はそのまま使用せず廃棄いただくようお願いいたします。